

Egenkontroll av medicintekniska produkter – undersöknings- / behandlingshjälpmedel

Alla kontroller dokumenteras i "Förteckning över medicintekniska produkter/ behandlingshjälpmedel" (Bilaga 2).

Blodtrycksmätare

Kontrollintervall: 1 ggr/år

Mätutrustning/procedur: Kontrollmanometer HE AB

- Alla blodtrycksmätare ska identifieras enligt lokal rutin.
- Kontrollera bollpump och slangar. Om de är spruckna ska de kasseras.
- Ta loss ventilen från bollpumpen och gör rent filtret från damm samt kontrollera att den går lätt att reglera.
- Kontrollera att manschettens kardborreband inte är för slitna. I så fall ska manschetten kasseras.
- Testa blodtrycksmanschetten med manometern enligt bruksanvisning.

Blodsockermätare

- Byt batteri vid behov.

Diskdesinfektor

Kontrollintervall: minst 1 ggr/år

Mätutrustning/procedur:

- Akut- och förebyggande underhåll samt kontroller sköts enligt lokal rutin.

Droppställning

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år

Mätutrustning/procedur:

- Rengör hjul så de hålls fria från skräp.
- Kontrollera att droppställningen står stadigt så tipprisk inte finns, om inte kasseras.

Spoldesinfektor

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år

Mätutrustning/procedur:

Akut- och förebyggande underhåll samt kontroller sköts enligt lokal rutin.

Stetoskop

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år

Mätutrustning/procedur:

- Stetoskop ska märkas enligt lokal rutin.
- Kontrollera att öronoliverna är hela och rena. Rengör med mild tvållösning alternativt M-sprit.
- Kontrollera att membranet inte är hårt och stelt. Kassera då stetoskopet.
- Provljyssna både membran- och klocksida (vrid på bröststycket för respektive funktion) genom att slå lätt på stycket.

Sug

Kontrollintervall: 1 ggr/år

Mätutrustning/procedur:

- Sugar ska märkas enligt lokal rutin.
- Kontrolleras enligt bruksanvisning.
- Kontrollera alla flaskor, slangar och lock så inga läckage finns.

Termometer – för rektal användning

Kontrollintervall: 1 ggr/år

Mätutrustning/procedur:

- Kontrollera vid påslag att alla segment i siffrorna finns och syns tydligt samt att termometern inte är skadad.
- Vid tveksam funktion – anskaffa ny.

Termometer – för öron

Kontrollintervall: 1 ggr/år

Mätutrustning/procedur:

- För rengöring – se medföljande bruksanvisning.
- Vid tveksam funktion – anskaffa ny.

Otoskop

Kontrollintervall: 1 ggr/år

Mätutrustning/procedur:

- Otoskopet ska märkas enligt lokal rutin
- Gör rent öronmunstycket med tops fuktad i M-sprit. Kontrollera att det är helt.
- Kontrollera att lampan ger ifrån sig ett godtagbart ljus. Om inte – prova att ladda alternativt byt batteri. Se bruksanvisning

Personvåg/Sittvåg/Sängvåg

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år

Mätutrustning/procedur:

- Personvåg ska märkas enligt lokal rutin
- Använd kontrollerade vikter.
- Vid fel kan tillverkaren kontaktas.